

ISTRUZIONI PER L'USO

NOME DEL PRODOTTO

Siringa SafeR®, siringa di sicurezza, (di seguito Siringa SafeR®)
SafeR® Sting, ago di sicurezza retrattile (di seguito ago SafeR®)

FORMATI

Capacità della siringa: Siringa di sicurezza da 1ml, 2ml, 3ml, 5ml.

Dimensioni ago: 20G, 21G, 22G, 23G, 25G, 26G, 27G.

Un ago smusso di riempimento 18G è fornito separatamente

L'ago SafeR® è fornito separatamente. La compatibilità tra la siringa SafeR® e l'ago SafeR® è garantita per ogni dimensione dell'ago.

DESTINAZIONE D'USO

SafeR® è una siringa di sicurezza automaticamente retrattile, ha lo scopo di fornire un metodo sicuro, accurato e affidabile per l'aspirazione dei fluidi e per l'iniezione di fluidi immediatamente dopo il riempimento. È destinata ad essere utilizzata per la somministrazione di farmaci (intramuscolare (IM), intradermica (ID) e sottocutanea (SC)). La siringa, una volta assemblata con il suo ago, incorpora un meccanismo di sicurezza passiva che ritrae e contiene l'ago contaminato dopo l'uso, aiutando nella prevenzione di possibili infezioni dovute a lesioni da aghi e riutilizzo della siringa. La retrazione dell'ago viene attivata dall'utilizzatore della siringa con una mano.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Seguire il protocollo istituzionale per l'applicazione della tecnica asettica (o seguire l'indicazione del personale medico) e la preparazione dell'area cutanea.
- Aprire le confezioni per estrarre sia la siringa SafeR® desiderata sia l'ago/i SafeR® desiderati. Collegare l'ago smusso di riempimento alla siringa con una rotazione in senso orario ed eseguire la preparazione del farmaco e l'aspirazione del farmaco. Quindi, una volta riempita la siringa con la quantità desiderata di medicinale, rimuovere l'ago smusso di riempimento e smaltirlo in un contenitore per taglienti.
- Collegare l'ago per l'iniezione alla siringa con una rotazione in senso orario.
- Iniettare il farmaco, secondo il protocollo medico stabilito o sotto l'indicazione del personale medico. Assicurarsi che tutto il farmaco sia iniettato.
- Continuare a premere il pulsante dello stantuffo fino a quando il meccanismo di retrazione non viene attivato. L'ago verrà automaticamente retratto all'interno della siringa e verrà percepito un "click".
- Dopo l'uso, smaltire il dispositivo secondo le procedure operative delle strutture sanitarie, specifiche per la gestione dei rifiuti potenzialmente infetti.
- In caso di fallimento del meccanismo di retrazione, abilitare il meccanismo ritraendo leggermente lo stantuffo, altrimenti smaltire la siringa nel contenitore per taglienti senza richiudere l'ago.
- Non rimuovere il connettore dell'ago dopo l'uso.

CARATTERISTICHE

Biocompatibile, sterile, apirogeno.
Funzione di sicurezza azionata con una sola mano.

PRECAUZIONI

- Gli utenti finali devono avere familiarità con le istruzioni per l'uso ed essere addestrati nella somministrazione di farmaci e iniezioni.
- Non usare se la confezione di una singola unità è danneggiata o il cappuccio dell'ago è staccato.
- Le siringhe e gli aghi sono sterili (sterilizzazione EtO) fino a quando non vengono rimossi dalla loro confezione protettiva. Sono esclusivamente monouso.
- Il meccanismo di retrazione dell'ago può essere attivato solo quando il farmaco o il fluido è stato completamente iniettato.
- Non spingere ulteriormente la siringa all'interno del corpo mentre si attiva il meccanismo di retrazione.
- Smaltire la siringa immediatamente dopo l'uso senza ulteriore manipolazione.

AVVERTENZE

- SafeR® ago retrattile è progettato per essere usato solo con siringhe SafeR®.
- Il riutilizzo della siringa può portare ad infezione o trasmissione di malattie: non tentare di riutilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere usato su pazienti con peso corporeo inferiore a 3kg.
- Non utilizzare questo prodotto per prelevare sangue o per punture endovenose.
- SafeR® è un dispositivo monouso: non risterilizzare.
- L'ago smusso di riempimento è progettato solo per la preparazione di farmaci e non è destinato a venire a contatto con il corpo umano. **NON USARE PER L'INIEZIONE DI FARMACI**
- Segnalare al fabbricante e all'autorità competente qualsiasi malfunzionamento del dispositivo, deterioramento delle prestazioni del dispositivo, istruzioni inadeguate o etichettatura inadeguata, in quanto, se non segnalato, ciò può causare morte o lesioni gravi o può portare alla morte o a un grave deterioramento dello stato di salute.